


電動鼻水吸引器 PochiSui KJH0308 取扱説明書

品質保証書付 B53-1-1

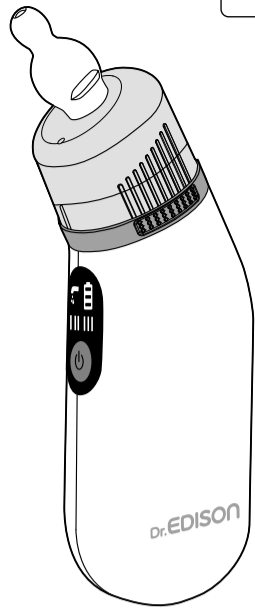

- この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品は家庭環境でお子様の鼻水を吸引することを目的として設計されていますが、大人の方にもご使用いただけます。
- 正しくお使いいただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書はご使用になる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 洗浄・部品の取り付け・取り外しをする際は、本書「部品の取り付け」をよく読んで行ってください。
- 本製品を他の方にお譲りになる際は、必ず本書及び「医療機器添付文書」も併せてお渡しください。

安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者及びほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の可能性が想定される内容を示します。
禁止	製品仕様上、してはいけない行為を示します。
指示	製品仕様上、必ず行っていただきたい行為を示します。


警告

- ⊘ 用途目的以外での使用はおやめください。耳・口・目には絶対に使用しないでください。
- ⊘ 鼻の病気・キズ・炎症・出血など異常がある場合は、ご使用をおやめください。患部に触れて悪化させる可能性があります。また、原因菌が付着すると感染するおそれがあります。
- ⊘ ノズルの先端を鼻孔に深く押し込まないでください。ケガをするおそれがあります。
- ⊘ 分解するなど、修理や改造はおやめください。事故や故障の原因となります。
- ⊘ 火気や熱源(コンロ・ストーブなど)の近くや高温になる場所、直射日光の当たる場所、振動・衝撃を受けやすい場所での放置やご使用は絶対におやめください。
- ⊘ 濡れた手で、充電・電源のON/OFFの操作はおやめください。感電のおそれがあります。
- ⊘ 本体の隙間にピンや針金などの金属物を入れないでください。故障やケガの原因となります。
- ❗ 使用中に出血したり痛がったりしたら、すぐに吸引を停止し、医師にご相談ください。
- ❗ ご購入後初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならないときは、ご使用前の前後に必ず各部品を洗浄し清潔に保ってください。
- ❗ 複数の方でご使用になる場合は、ご使用前の前後に各部品を新しいものと交換するか洗浄し、消毒や除菌してからご使用ください。
- ❗ ノズルは本製品専用のノズルをご使用ください。
- ❗ 本製品及び各部品は乳幼児やペットの手の届かない所に保管してください。お子様だけでのご使用は、ケガなど思わぬ事故の原因となります。万一部品などを誤飲した場合は、すぐに医師にご相談ください。
- ❗ 異常を感じたときはすぐにご使用を中止し、カスタマーセンターまでお問い合わせください。


注意

- ⊘ 人間以外にはご使用いただけません。動物などにお使いになると、暴れてケガをするおそれがあります。
- ⊘ 強い衝撃を与えないでください。物を強くぶつけたり、投げたり、高いところから落下させたりすると故障するおそれがあります。
- ⊘ 本製品が破損した際は、破損した部分に触れたりそのままご使用を続けたりしないでください。感電やケガの原因となります。
- ⊘ 浴室など高温多湿な場所や、濡れる場所での使用・放置・保管はおやめください。故障の原因となります。
- ❗ 完全防水ではありません。お手入れの際は、本書「お手入れ方法」に従い、正しく行ってください。
- ❗ 操作や充電は必ず大人の方が行ってください。お子様だけでのご使用は、ケガなど思わぬ事故の原因となります。
- ❗ 安定した姿勢で鼻水を吸引してください。不安定な姿勢や動きながらの操作はケガなど思わぬ事故の原因となります。
- ❗ ご使用される前に、常に各部品のキズや動作などに異常がないかご確認ください。
- ❗ 本製品及び梱包材を廃棄する際は、お住まいの各自治体のルールに従って処分してください。
- ❗ 病院やご自宅でもご使用いただけますが、MRIまたはCT装置と同時での使用はおやめください。また、ICU及びその他の緊急状態での使用はおやめください。

各部のなまえ

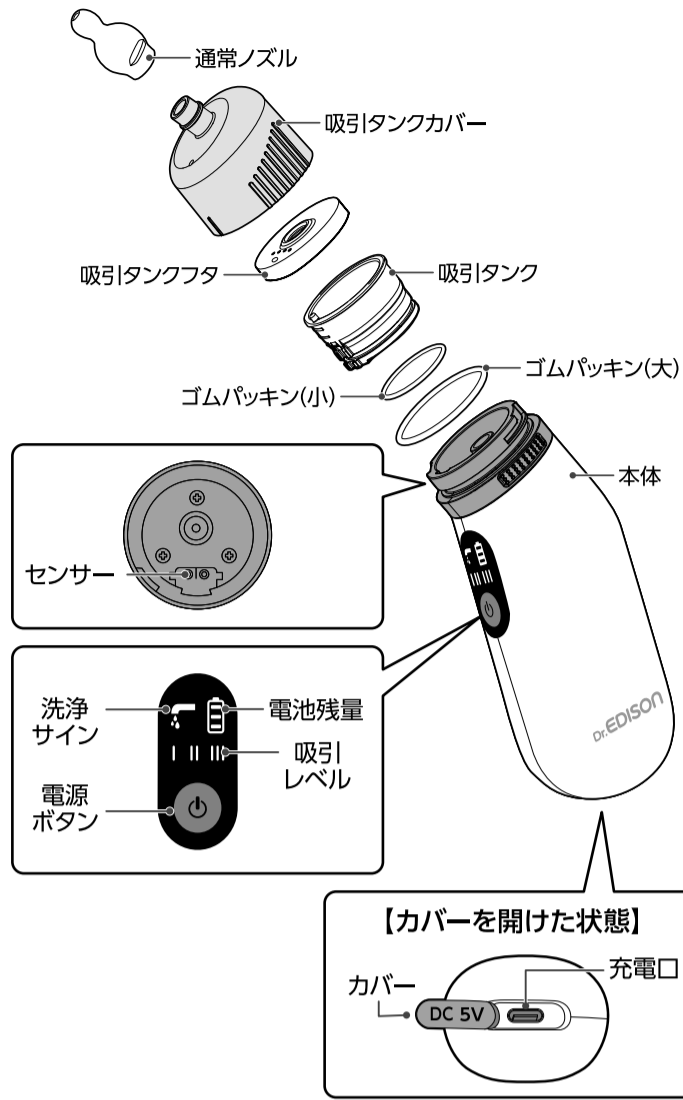


組立時のイメージ

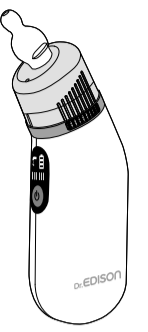

付属品



コンパクトノズル

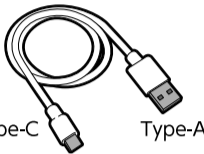

Type-C Type-A
USBケーブル

- ・取扱説明書/品質保証書(本書)
- ・医療機器添付文書

全ての部品がそろっていることをご確認ください。

吸引に関するご注意

- 本製品の動作温度は0~40℃、動作湿度は85%以下(結露がないこと)です。それ以外の環境下での使用はおやめください。
- 固まっているなど極度に粘度の高くなった鼻水は吸引できません。
- 鼻腔内が乾燥した状態での使用はおやめください。
- 鼓膜に圧力がかかりすぎるのを防ぐため、吸引中はお子様に息を止めさせたり、口を閉じさせたり、唾液を飲み込ませたりしないようご注意ください。
- 吸引は片方の鼻孔ずつ行ってください。
- 吸引ノズルの先端を鼻孔内の粘膜に直接押し当てて鼻孔をふさぐことが無いようにしてください。吸引圧が上昇するおそれがあります。
- 使用時に粘膜を傷つけないようご注意ください。
- 一回の吸引は3~5秒以内にしてください。短い吸引を繰り返し、少しずつ吸引してください。
- 吸引タンクには鼻水をためすぎないよう、こまめに捨て、ご使用後は必ず洗浄や消毒をしてください。

お手入れに関するご注意


- ご購入後初めてご使用になるときや長期間ご使用にならないときは、ご使用前の前後に必ず各部品を洗浄してください。
- 本体や各部品が汚れたときは、すぐに洗浄及び消毒をしてください。シンナーやベンジンなど強い化学薬品や有機溶剤などで消毒しないでください。
- 本体の汚れは乾いた布やティッシュで拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- 本体を水に浸けないようご注意ください。
- 本体を食器洗浄機・電子レンジ・乾燥機にかけないでください。
- 各部品の洗浄及び消毒は、本書「お手入れ方法」に従って正しく行ってください。

保管についてのご注意

- 本製品及び各部品は乳幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
- 水気が付いたまま保管すると、劣化や故障の原因となります。
- 重いものを載せたり、重いものの中に挟んだりしないでください。
- ⊘ 次のような場所には保管しないでください。
 - 直射日光の当たる場所 ●高温多湿の場所 ●振動の加わりやすい場所 ●埃の多い場所
 - 火気の近く ●濡れている場所
- ❗ 長期間(半年以上)使用しなかったときは、電池が劣化するため、半年に1回は満充電にして動作確認をしてください。

充電のしかた

- ①必ず電源は切った状態にしてください。カバーを開けて、USBケーブルを本体充電口とUSB電源アダプタに接続します。
- ②コンセントにUSB電源アダプタを差し込みます。
 - ・電池残量表示が青く点滅
- ③電池残量表示が青く点灯したら、USB電源アダプタをコンセントから抜き、USBケーブルを本体充電口から抜きます。
- ④カバーを閉めてください。

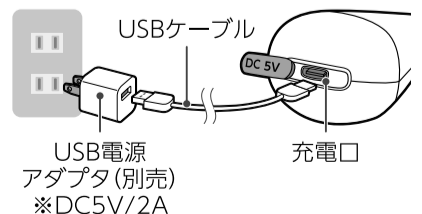


USB電源アダプタ(別売)
※DC5V/2A

- ❗ お買い上げ時には十分に充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。
- ❗ 充電完了後はUSBケーブルを接続したままにしないでください。過充電の原因となります。

部品の取り付け


1 吸引タンクの組み立て方

①吸引タンクの突起部分と吸引タンクフタ部分の穴の位置を合わせてはめ込む
※吸引タンクにゴムパッキン(小)が装着されているか確認してください。

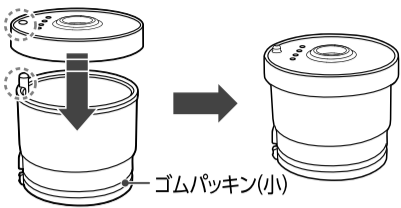


2 吸引タンクの付け方

①本体の凹み部分と吸引タンクの凸部分を合わせてはめ込む
※本体にゴムパッキン(大)が装着されているか確認してください。

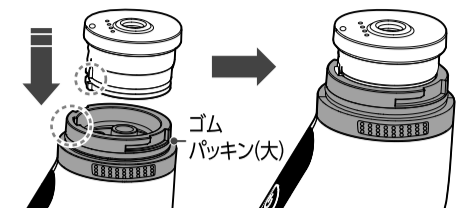


3 吸引タンクカバーの付け方

①吸引タンクカバーの▼印と本体の▲マークを合わせる
②しっかりと最後まではまっていることを確認したら、矢印の方向に▲マークまで回す

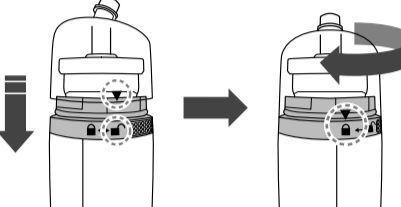

4 ノズルの付け方

①吸引タンクカバーの突起にノズルを合わせてはめ込む
※隙間がないように押し込んでください。
※ノズル先端を手で触れないようにしてください。

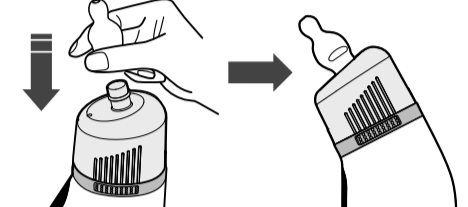

※取り外す際は、上記の逆の手順で取り外してください。

❗ すべての部品が確実に取り付けられていることをご確認ください。取り付けが不十分な場合、吸引圧が上がらず正常に使用できません。

ご使用方法

①電源ボタンを上に向けたまま、本体をしっかりと持ち、電源ボタンを1回押して電源を入れてください。ノズルを鼻腔内の鼻水に接触させて吸引してください。

※吸引は、弱い吸引圧から開始し、様子を見ながら吸引圧を調整してください。
※1回の吸引は3~5秒以内にしてください。

②吸引が終了したら、本体を鼻から外し、電源ボタンを長押しして電源を切ります。

❗ 吸引処置の一時中断または終了時には、本体を横置きにはしないでください。吸引タンクの中身が本体に流入するおそれがあります。

センサーについて


- 吸引タンクから鼻水が漏れ、本体のセンサーに鼻水が付着すると、センサーが作動し自動で停止します。
- 表示画面の洗浄サインが赤く点灯します。
- お手入れ方法に従い、鼻水を取り除いてください。




ノズルの使い分け

- 通常使用の場合は通常ノズルをご使用ください。
- 鼻腔が小さい場合や、通常ノズルでうまく吸引できない場合はコンパクトノズルをご使用ください。

吸引のコツ

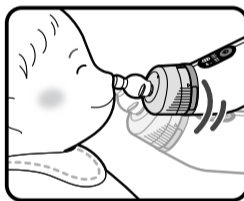

ズルズルと鼻水を吸う音がない場合は、上下左右に動かして鼻水がある場所を探してください。

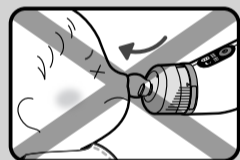

押し付けると吸引圧が上昇するので危険です。使わないでください。



ケガや鼻の病気の際は使わないでください。

※鼻の中に傷を付けないように、優しく動かしてください。
※吸引した鼻水は必ず毎回捨て、吸引タンク内を清潔に保ってください。

お手入れ方法

ご使用後は必ず各部品を本体より取り外してから洗浄してください。洗浄後は水気をよく拭き取り、乾燥させてください。乾燥後は、衛生的に保管するために再度組み立ててください。ノズルは埃が付きやすい素材材でできています。袋などに入れて清潔に保ってください。

鼻水の廃棄・洗浄・消毒

- 本体は防水ではありません。
- 鼻水の廃棄作業は、洗面台などで行ってください。ノズルを上向きにして、部品の取り付け作業の逆の手順で分解しながら行ってください。その際、鼻水がこぼれて着衣などを汚すおそれがありますのでご注意ください。
- 鼻水を廃棄した後は、本体以外の吸引パーツをぬるま湯や水で洗浄し、乾燥させてください。
- 吸引した鼻水は必ず毎回捨て、吸引タンク内を清潔に保ってください。放置すると中で本体に鼻水が付着して固まり、動かなくなることがあります。
- 本体や各部品が汚れたときは、すぐに洗浄及び消毒をしてください。シンナーやベンジンなどの強い化学薬品や有機溶剤などで洗浄しないでください。
- 本体の汚れは乾いた布やティッシュで拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布を固く絞ってから拭いてください。
- 部品によって洗浄・消毒方法が異なります。下記の表を確認してください。

材質	シリコンゴム	ポリカーボネート	ABS樹脂
名称	通常ノズル コンパクトノズル	吸引タンクカバー	本体
洗浄・消毒方法	ゴムパッキン(小) 吸引タンクフタ ゴムパッキン(大)	吸引タンク	
水洗い/薬液消毒	○	○	×
煮沸消毒	○	○	×
電子レンジ消毒	○	×	×
食器洗浄機(乾燥機を含む)	○	×	×

消毒方法

●煮沸消毒は大きめの鍋にお湯を入れ、鍋の内側に触れないように2~3分煮沸してください。●電子レンジ消毒や薬液消毒は各消毒方法に従ってください。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
電源が入らない	充電が切れています。	充電をしてください。
吸引圧が弱い・吸引しない	電池残量が少なくなっています。	充電をしてください。
	各部品の接続が外れています。	ノズルや吸引タンクなどの各部品が確実に接続されているかご確認ください。
	使用角度が間違っています。	角度の調整をしてください。
電源が切れた	吸引タンクが満になっています。	電源を切り、吸引タンクを洗浄し、乾燥させてからご使用ください。本体センサー部分に付着した汚れもやわらかい布で拭き取ってください。
電池残量マークが点滅する	電池残量が少なくなっています。	充電をしてください。
匂いがする	鼻水などが残っている可能性があります。	お手入れ方法に従って掃除をしてください。

仕様

医療機器分類	管理医療機器	動作環境	温度:0℃~40℃、湿度:85%以下(結露がないこと)
一般的名称	電動式可搬型吸引器	輸送及び保管環境	温度:-20℃~55℃、湿度:93%以下(結露がないこと)
販売名	電動鼻水吸引器 PochiSui	電撃に対する保護の程度	BF形装着部
型式	T2610JP	防塵防水保護等級	IP22
認証番号	第306AFBZX00056000号	電磁両立性	IEC60601-1-2:2014/AMD1:2020に適合
最大吸引圧	-70KPa±10%	サイズ	W48×D39×H145mm(ノズル含まず)
電源	リチウムポリマー電池DC3.7V	質量	約143g(ノズル含まず)

※本製品の仕様は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
※本書に使用されているイラストと実際の商品では一部異なることがあります。

保証規定について

お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入願います。

品質保証書	
保証規定	1) 一度ご使用した製品は、原則としてお取替えできません。 2) 保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。 3) 万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。 4) 製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。 5) その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。 6) 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。 7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 8) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
製品名	電動鼻水吸引器 PochiSui
保証期間	お買い上げより1年間(ただし保証規定による)
お客様	お名前
	ご住所 〒 TEL
販売店	店名
	住所 〒 TEL
保証期間内でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。 ●素材の経年劣化や摩耗による損害など製品の寿命 ●お客様による分解、修理、改造を行った場合 ●取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障 ●不慮の事故による製品の故障 ●他社製品との組み合わせによる故障 ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損害 ●一般家庭以外(例えば業務用、船舶など海上)で使用された場合の故障および損害 ●お買い上げ後の輸送、落下やその他衝撃による部品の变形や破損 ●保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合および保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合 ●修理依頼の際に保証書が添えられていない場合	

製造販売業者：株式会社ケイジェイシー
〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4 Y.B.ビル
製造業者：Hetaida Technology Co.,Ltd.



商品詳細や
使い方動画はこちら

お問い合わせはこちら

カスタマーセンター 0120-415-553
年末年始・長期連休期間を除く 9:00-17:00
※土日祝は電話がつながりにくい場合があります