

電動鼻水吸引器ハンディ KJH1122  
取扱説明書

品質保証書付 B21-1-1



- この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品は家庭環境でお子様の鼻水を吸引することを目的として設計されていますが、大人の方にもご使用いただけます。
- 正しくお使いいただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書はご使用になる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 洗浄・部品の取り付け・取り外しをする際は、本書「部品の取り付け」をよく読んで行ってください。
- 本製品を他の方にお譲りになる際は、必ず本書及び「医療機器添付文書」も併せてお渡しいたください。

Dr.EDISON 電動鼻水吸引器ハンディの特長

- 電動吸引でムラなく安定した吸引ができます。
- コンパクト設計で保管や持ち運びに便利です。
- お鼻や鼻水の状態に合わせて選べる2種類のノズルが付属されています。

安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者及びほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
<b>注意</b>	誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の可能性が想定される内容を示します。
<b>禁止</b>	製品仕様上、してはいけない行為を示します。
<b>指示</b>	製品仕様上、必ず行っていただきたい行為を示します。

警告

- 用途目的以外のご使用はおやめください。耳・口・目は絶対に使用しないでください。
- 鼻の病気・キズ・炎症・出血など異常がある場合は、ご使用をおやめください。患部に触れて悪化させる可能性があります。また、原因菌が付着すると感染するおそれがあります。
- ノズルの先端を鼻孔に深く押し込まないでください。ケガをするおそれがあります。
- 分解するなど、修理や改造はおやめください。事故や故障の原因となります。
- 火気や熱源（コンロ・ストーブなど）の近くや高温になる場所、直射日光の当たる場所、振動・衝撃を受けやすい場所での放置やご使用は絶対におやめください。
- 濡れた手で、電池交換・電源のON/OFFの操作はおやめください。感電のおそれがあります。
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物を入れないでください。故障やケガの原因となります。
- ▲使用中に出血したり痛がったりしたら、すぐに吸引を停止し、医師にご相談ください。
- ▲ご購入後初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならないときは、ご使用前に必ず各部品を洗浄し清潔に保ってください。
- ▲複数の方でご使用になる場合は、ご使用前に各部品を新しいものと交換するか洗浄し、消毒や除菌してからご使用ください。
- ▲ノズルは本製品専用のノズルをご使用ください。
- ▲本製品及び各部品は乳幼児やペットの手の届かない所に保管してください。お子様だけでのご使用は、ケガなどと思われる事故の原因となります。万一一部品などを誤飲した場合は、すぐに医師にご相談ください。
- ▲異常を感じたときはすぐにご使用をおやめになり、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

注意

- 人間以外にはご使用いただけません。動物などにお使いになると、襲われてケガをするおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。物を強くぶついたり、投げたり、高いところから落下させたりすると故障するおそれがあります。
- 本製品が破損した際は、破損した部分に触れたりそのままご使用を続けたりしないでください。感電やケガの原因となります。
- 浴室など高温多湿な場所や、濡れる場所での使用・放置・保管はおやめください。故障の原因となります。
- ▲完全防水ではありません。お手入れの際は、本書「お手入れ方法」に従い、正しく行ってください。
- ▲操作や電池交換は必ず大人の方が行ってください。お子様だけでのご使用は、ケガなどと思われる事故の原因となります。
- ▲安定した姿勢で鼻水を吸引してください。不安定な姿勢や動きながらの操作はケガなどと思われる事故の原因となります。
- ▲ご使用される前に、常に各部品のキズや動作などに異常がないかご確認ください。
- ▲本製品及び梱包材を廃棄する際は、お住まいの各自治体のルールに従って処分してください。
- ▲長期間ご使用にならない場合は、機器から電池を取り出してください。液漏れの原因となります。
- ▲病院やご自宅でもご使用いただけますが、MRIまたはCT装置と同時でのご使用はおやめください。また、ICU及びその他の緊急状態でのご使用はおやめください。

乾電池に関する安全上の注意


電池の使い方を誤ると、発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。ケガや機器故障の原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

注意

- 電池を加熱・分解・改造・火に近づけるなどしないでください。
- ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。充電式（ニカド・ニッケル水素など）電池を使用すると、機器が持っている性能を発揮できないことがあります。（動作が不安定、機器が誤作動するなど）
- 付属の電池は充電式に造られていません。充電すると液漏れ、発熱、破損のおそれがあります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の（+）（-）を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管したりしないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装ラベルを剥がしたり、傷つけたりしないでください。
- ▲電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
- ▲電池から漏れた液が目に入ったらすぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。皮膚や衣料に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- ▲使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。
- ▲電池の極性（+）（-）を正しくセットしてください。
- ▲長期間使用しない場合は、機器から電池を取り出してください。液漏れの原因となります。
- ▲電池に表示されている使用推奨期間内にご使用ください。

各部のなまえ


全ての部品がそろっていることをご確認ください。

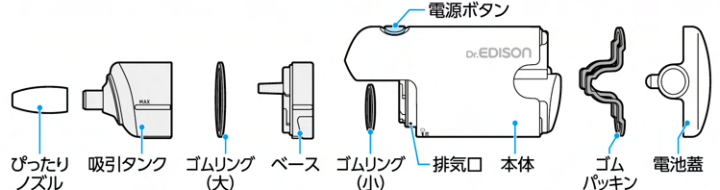

組立時のイメージ



付属品のなまえ

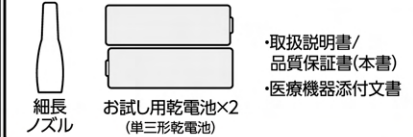

吸引に関するご注意

- 本製品の動作温度は5～40℃、動作湿度は15～90%（結露がないこと）です。それ以外の環境下でのご使用はおやめください。
- 固まっているなど極度に粘度の高くなった鼻水は吸引できません。
- 鼻腔内が乾燥した状態でのご使用はおやめください。
- 鼓膜に圧力がかかりすぎるのを防ぐため、吸引中はお子様に息を止めさせたり、口を閉じさせたり、唾液を飲み込ませたりしないようご注意ください。
- 吸引は片方の鼻孔ずつ行ってください。
- 吸引ノズルの先端を鼻孔内の粘膜に直接押し当ててふさぐことが無いようにしてください。吸引力が上昇するおそれがあります。
- 使用時に粘膜を傷つけないようご注意ください。
- 一回の吸引は3～5秒以内に行ってください。短い吸引を繰り返し、少しずつ吸引してください。
- 吸引タンクには鼻水をためすぎないように、こまめに捨て、ご使用後は必ず洗浄や消毒をしてください。

お手入れに関するご注意


- ご購入後初めてご使用になるときや長期間ご使用にならないときは、ご使用前に必ず各部品を洗浄してください。
- 本体や各部品が汚れたときは、すぐに洗浄及び消毒をしてください。シンナーやベンジンなど強い化学薬品や有機溶剤などで消毒しないでください。
- 本体の汚れは乾いた布やティッシュで拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- 本体を水に浸けないうちにご注意ください。
- 本体を食器洗浄機・電子レンジ・乾燥機にかけないでください。
- 各部品の洗浄及び消毒は、本書「お手入れ方法」に従って正しく行ってください。

保管についてのご注意

- 本製品及び各部品は乳幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
- 水気が付いたまま保管すると、劣化や故障の原因となります。
- 重いものを載せたり、重いものの中に挟んだりしないでください。
- 次のような場所には保管しないでください。
  - 直射日光の当たる場所
  - 高温多湿の場所
  - 振動の加わりやすい場所
  - 埃の多い場所
  - 火気の近く
  - 濡れている場所
- ▲長期間ご使用にならない場合は、機器から電池を取り出してください。液漏れの原因となります。

## 電池の入れ方

お試し用電池が付属されていますが、新しい電池と交換することをお勧めいたします。下記の手順で付属の電池(単三形乾電池)を入れてください。

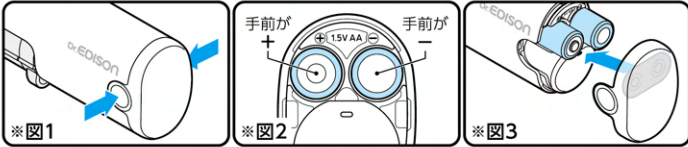


①電池蓋を開く(※図1) 電池蓋の両側の丸い部分を指で軽く押しながら開けます。

②+と-の向きに注意して、電池を入れます(※図2)

③電池蓋を閉める(※図3) 電池蓋を矢印の方向へカチッと音がするまで押し込んでください。

※ゴムパッキンは外れやすいのでご注意ください。ゴムパッキンがなくても吸引性能に影響はありません。

## 部品の取り付け

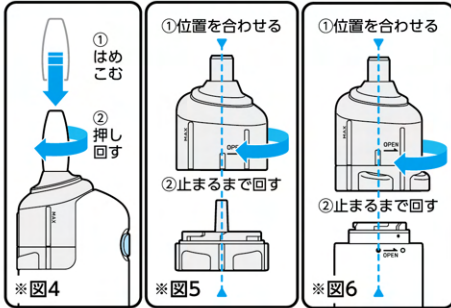

ノズルの付け方(※図4)

- ①穴に合わせてはめこむ
- ②隙間がないよう押し直す

吸引タンクの付け方(※図5)

- ①吸引タンクの[OPEN]の線を図のように合わせて入れる
- ②矢印の方向に止まるまで回す

ベースの付け方(※図6)

- ①本体の[OPEN]の線を図のように合わせて入れる
- ②矢印の方向に止まるまで回す
- ※取り外す際は、上記の逆の手順で取り外してください。

## ご使用方法

すべての部品が確実に取り付けられていることをご確認下さい。取り付けが不十分な場合、吸引力が上がらず正常に使用できません。

●本体をしっかり持ち、ノズルを鼻の穴に軽く押し当てて、電源ボタンを押したまま鼻水を吸引します。●一回の吸引は3~5秒以内としてください。●電源ボタンを離すと、吸引が止まります。

吸引処置の一時中断または終了時には、本体を横置きにはしないでください。吸引タンクの中身が本体に流入するおそれがあります。

●通常使用の場合は**びったりノズル**をご使用ください。  
●鼻腔が小さい場合や、びったりノズルでうまく吸引できない場合は**細長ノズル**をご使用ください。

## 吸引のコツ



ズルズルと鼻水を吸う音がない場合は、上下左右に動かして鼻水がある場所を探してください。



押し付けると吸引力が上昇するので使用しないでください。

※鼻の中を傷つけないように必ず優しく動かしてください。※1回の吸引は5秒以内にしてください。※吸引した鼻水は都度捨て、タンク内を清潔に保ってください。鼻水がタンクのMAXラインを越えると、内部に鼻水が混入して故障することがありますのでご注意ください。


## お手入れ方法

ご使用後は必ず各部品を本体より取り外してから洗浄してください。洗浄後は水気をよく拭き取り、乾燥させてください。乾燥後は、衛生的に保管するために再度組み立ててください。ノズルは埃が付きやすい素材材ですので、袋などに入れて清潔に保ってください。

### 鼻水の廃棄・洗浄・消毒

- 本体は防水ではありません。下記方法に従ってお手入れしてください。
- 鼻水の廃棄は、部品の取り付けの逆の手順で行ってください。
- 鼻水の廃棄作業は、洗面台などで行ってください。ノズルを上向きにし、ベースを本体から取り外してください。次に吸引タンクからベースを取り外し、吸引タンク内の鼻水を廃棄します。その際、鼻水がこぼれて着衣などを汚すおそれがありますのでご注意ください。
- 鼻水を廃棄した後、ベース・吸引タンク・ノズルをぬるま湯や水で洗浄し、乾燥させてください。鼻水の廃棄作業は終了です。
- 吸引したタンクは都度洗い流し、鼻水を廃棄してください。放置すると本体内に鼻水が混入して固まり、動かなくなることがあります。
- 本体や各部品が汚れたときは、すぐに洗浄及び消毒をしてください。シンナーやベンジンなど強い化学薬品や有機溶剤などで洗浄しないでください。
- 本体の汚れは乾いた布やティッシュで拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。

### 洗浄前に準備するもの

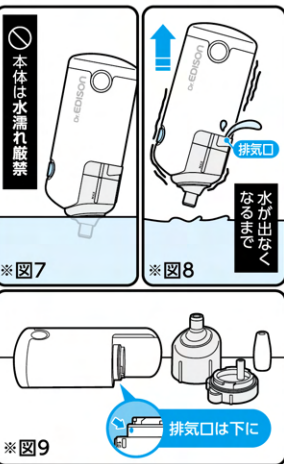

- 水またはぬるま湯 ●洗浄用ぬるま湯を入れる容器
- 水気を拭くためのティッシュやタオルなど

  - ①用意した容器に水またはぬるま湯を入れる。
  - ②ノズルを取り外し、吸引タンクの鼻水がないことを確認する。吸引タンクの先端だけを図のような角度で水に浸ける。(※図7)
  - ③先端が浸かった状態で電源スイッチを押して約10秒吸引する。  
※水が周りに飛び散らないように、本体を傾けて排気口を下に向け、指などで水流を抑えてください。
  - ④先端を水から出し、本体の中にとまった水分が出なくなるまで吐き出す。(※図8)
  - ※粘り気が強い鼻水は1度で洗浄できないことがあります。②~④を数回繰り返してください。
  - ⑤水気を拭き取り、図のように寝かせてそのまま乾かす。(※図9)
  - ※本体は排気口を下にし倒れたり転がったりしないようにご注意ください。
  - ⑥乾燥後、本体と他パーツを組み立てて保管する。  
※水分を十分に吐き出さないと、使用中に排気口から水分が出る場合があります。排気口をティッシュなどで押さえないでください。完全に排気口をふさいでしまうと、吸引力が落ちる原因となります。

●部品によって洗浄・消毒方法が異なります。下記の表を確認してください。

名称 (材質)	ノズル、ゴムリング、 ゴムパッキン (シリコーン)	吸引タンク (ポリカーボネート)	ベース (ポリカーボネート)	本体 (ABS樹脂)
洗浄・消毒方法				
水洗い/薬液消毒	○	○	○	×
煮沸消毒	○	○	○	×
電子レンジ消毒	○	×	×	×
食器洗浄機 (乾燥機を含む)	○	×	×	×

●煮沸消毒は大きめの鍋にお湯を入れ、鍋の内側に触れないように2~3分煮沸してください。●電子レンジ消毒や薬液消毒は各消毒方法に従ってください。

## 故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
電源が入らない	電池残量不足です。	新しい電池と交換してください。
	電池の+-の向きが逆になっています。	電池の向きを確認して入れなおしてください。
吸引力が弱い・吸引しない	モーターまたは電源スイッチが故障した可能性があります。	カスタマーセンターまでお問い合わせください。
	電池残量がなくなった可能性があります。 各部品の接続が外れている可能性があります。	新しい電池と交換してください。 ノズルや吸引タンクなどの部品が確実に接続されているかご確認ください。
使用中に排気口から液体が出てくる	吸引タンクが詰まっている可能性があります。	故障ではありません。ご使用後は各部品を洗浄し、よく乾燥させてからご使用をお願いいたします。使用中に出てきた場合は、排気口をティッシュなどで軽くふさぎながらご使用ください。※穴を完全にふさぐと吸引力の低下につながる可能性がありますのでご注意ください。
	一定量以上の液体が本体内部に混入している可能性があります。	吸引タンクは使用毎に洗浄し、完全に乾燥させてからご使用ください。
本体から匂いが出る	本体内部に洗浄した水や鼻水などが残っている可能性があります。	各部品を洗浄し、本体の周りを乾いた布または綿棒などで掃除してください。

## 仕様

医療機器分類	管理医療機器	電源	3.0V(単三アルカリ乾電池×2)
一般的な名称	電動式可搬型吸引器	動作環境	温度:5℃~40℃、湿度:15%~90%(結露がない状態)
販売名	電動鼻水吸引器/ハンディ	輸送及び保管環境	温度:-25℃~70℃、湿度:15%~90%(結露がない状態)
型式	HNA-130	電撃に対する保護の程度	BF型装着部
認証番号	第303AFBZX00092000号	防塵防水保護等級	IP22
吸引圧	-63kPa±10%	電磁両立性	IEC 60601-1-2:2014に適合
吸引ポンプの排気流量	2.0L/分±20%	サイズ/質量	128×52×36mm/130g(電池含まず)

※本製品の仕様は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

※本書に使用されているイラストと実際の商品では一部異なることがあります。

## 保証規定について

お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入願います。

### 品質保証書

#### 保証規定

- 1)一度ご使用した製品は、原則としてお取替えできません。
- 2)保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。
- 3)万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 4)製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。
- 5)その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。
- 6)製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。
- 7)保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty only in Japan.)
- 8)保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

製品名	電動鼻水吸引器/ハンディ	保証期間	お買い上げより1年間(ただし保証規定による)
お客様	お名前		
	ご住所 〒		TEL
販売店	店名		
	住所 〒		TEL

保証期間内でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。

- 素材の経年劣化や摩耗による損傷など製品の寿命
- お客様による分解、修理、改造を行った場合
- 取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障
- 不慮の事故による製品の故障
- 他社製品との組み合わせによる故障
- 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧及びその他の天災地変による故障及び損害
- 一般家庭以外(例えば業務用、船舶など海上)で使用された場合の故障、及び損害
- お買い上げ後の輸送、落下やその他衝撃による部品の变形や破損
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合及び保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合
- 修理依頼の際に保証書が添えられていない場合

製造販売業者名 ヒュービディックジャパン株式会社

〒192-0906 東京都八王子市北野町507-6  
TEL:042-649-1920

販売業者名 株式会社ケイジエイサー

〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4Y.B.ビル



商品詳細や  
使い方は  
こちら

お問い合わせはこちら

カスタマーセンター 0120-415-553  
営業時間 月~金 9:00~18:00(祝日を除く)